

— BEAUTYLIGHT —

PROTOCOLS



• Protocolos Inovadores, Resultados Surpreendentes •



PLASMA REPAIR



PLASMA REVERSE

AUTORA DOS PROTOCOLOS:

- **PLASMAREPAIR E PLASMA REVERSE**



SANDRA COSTA

- Esteticista Especialista em Cosmetologia e Marketing.
- Professora de pós-graduação em Estética.
- Habilitada em Laserterapia.
- Palestrante de cursos e Congressos na área da Estética.
- Especialista em Jato de Plasma Peelings e Microagulhamento.
- Graduando em Biomedicina.
- Consultora de estética da MMO.

SOBRE O PROJETO

— BEAUTYLIGHT —

PROTOCOLS

O **BEAUTYLIGHT PROTOCOLS** é um projeto que têm a combinação das melhores tecnologias MMO com resultados que irão te surpreender.

Consultores se uniram para elaborar protocolos com técnicas exclusivas e revolucionárias da área da estética para tratamentos faciais, corporais e capilares denominados das seguintes formas:

- **FACIAL:** PLASMAREPAIR E PLASMAREVERSE.
- **CORPORAL:** VACUMLASER INTENSIVE E VACUMLASER TRANSITION.
- **CAPILAR:** LIGHTHAIR CONTROL E LIGHTHAIR ANTIAGE.



PLASMA REPAIR

Nossa pele é um órgão fascinante que está em constante renovação, principalmente a camada mais superficial da pele, a nossa epiderme.

Devido uma série de fatores intrínsecos e extrínsecos, ela vai perdendo a capacidade de se auto reparar frente aos danos que constantemente está exposta.

O reparo tecidual é o que permite a integridade do tecido e a continuidade em suas funções. Por isso, devemos sempre estar atentos as reações do nosso corpo nesse processo!

E é com muita satisfação que apresentaremos protocolos inovadores para tratamentos faciais.

Através da Técnica **PLASMAREPAIR**, temos uma combinação de tecnologias e recursos onde é possível, com o uso do Jato de Plasma associado a Fotobiomodulação, reativar funções celulares comprometidas e promover a recuperação da pele nos casos em que há um mal funcionamento celular que gera o envelhecimento precoce e processos cicatriciais irregulares.

Se encante com tudo o que temos para oferecer a você!



PLASMA REPAIR

TÉCNICAS REPARADORAS PARA UMA PELE MAIS SAUDÁVEL.

Tratamentos para
cicatrizes de acne,
linhas de expressão,
flacidez e
envelhecimento da
pele.



SANDRA COSTA

CICATRIZ DE ACNE

A acne é uma das doenças de pele mais comuns. Após o término da fase inflamatória ativa, uma parte significativa dos pacientes com acnes apresentam cicatrizes permanentes (METELMANN, 2010). Estas cicatrizes podem ser classificadas como: Hipertróficas, Queloidianas e Atróficas.

Estudos mostram seu impacto, apontando uma grande incidência de transtornos de personalidade introvertida e depressão em pacientes com esta patologia (KALIL, 2015).


Em busca de reverter ou melhorar esta disfunção estética existe uma gama de terapias disponíveis baseadas na indução de colágeno para melhorar a aparência da pele.

Através do programa de tratamento do PLASMAREPAIR, é possível com uso do Jato de Plasma, promover uma lesão no tecido, induzindo assim a formação de colágeno, além de reorganizar as fibras de colágeno já existente, proporcionado assim um tecido mais uniforme, de maneira segura, eficaz e não invasiva com a combinação das tecnologias do laser de baixa intensidade.

Tratamento para Cicatriz de Acne

ETAPA

01

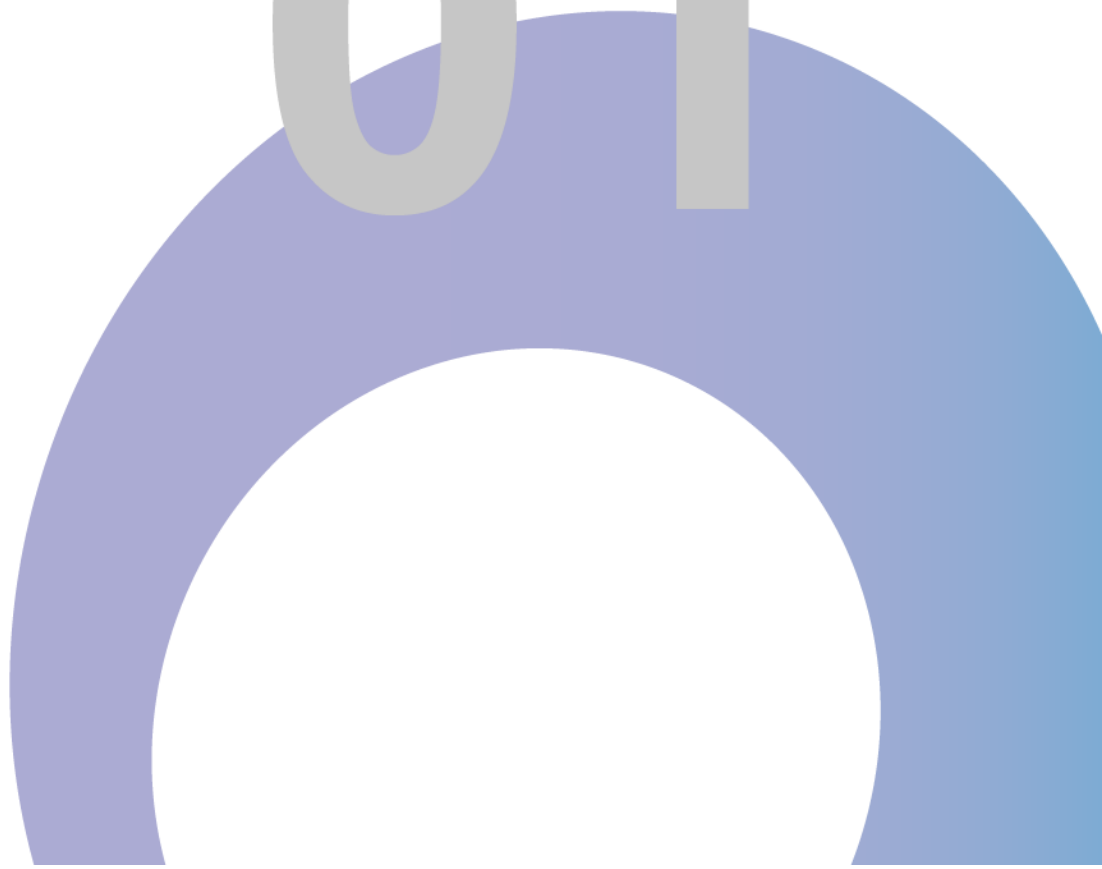

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO

- **NEW SKIN** (*Peeling elétrico e Jato de plasma*).
- **VÊNUS** (*Fotobiomodulação Laser e LED*).
- **RECOVER** (*Fotobiomodulação Sistêmica Vascular*).



Preparo da pele

- Os cuidados pré-procedimentos são indicados para todos os biotipos cutâneos e são tão importantes quanto os tratamentos faciais, pois preparam a pele para receber os estímulos e potencializam os resultados. Os cuidados pré-procedimentos são indicados para todos os biotipos cutâneos e são tão importantes quanto os tratamentos faciais, pois preparam a pele para receber os estímulos e potencializam os resultados.

O preparo inclui:

- Limpeza de pele;
- Peeling superficial;
- Hidratação.

Adequação do uso Skin Care.

Obs. Na sessão de preparo podemos inserir no protocolo o uso da terapia ILIB e o Laser e Leds para potencializar os resultados e minimizar intercorrências.

PROTOCOLO DE SUGESTÃO

• CICATRIZ DE ACNE

Este protocolo deverá ser realizado com intervalo de 7 dias, após preparo de pele.

1ª Sessão

- ILIB (Recover) Luz vermelha (aplicação transcutânea) 30 min.
- Higienização – Espuma com Clorexidina. Aplicar sobre a face toda e remover com água. Secar bem a pele com toalha ou lenço de papel.
- Peeling Plasma (New Skin) - Ponteira L ajustar a intensidade de acordo com a sensibilidade da pele, aplicar o peeling com a ponteira L em toda face de modo homogêneo.
- Em seguida reforçar nas áreas com cicatriz de acne.
- Led azul aplicar em toda a face (Vênus) para hidratação e descontaminação.
 - Aplicar 2 min em modo varredura em toda face.
- Aplicação de anestésico tópico – aguardar por 30 a 40 min e remover completamente com gaze umedecida em soro fisiológico. Obs: Para melhor efeito no reparo de tecido, ideal o anestésico “não” conter vasoconstritor.
- Jato de plasma pontilhado na cicatriz (New Skin).
 - Ajustar a intensidade de acordo o tipo e sensibilidade da pele. Aplicar de modo pontilhado fazendo todo contorno da cicatriz.
- Luz verde e vermelha para reparo tecidual (New Skin). Aplicar 20 seg no modo de emissão simultânea de modo pontual sobre as lesões.
- Luz âmbar com infravermelho (Vênus). Aplicar 20 seg do modo emissão simultânea de modo pontual sobre as áreas com lesões.
- Aplicação dermocosméticos (os ativos indicados para esta fase são específicos para auxiliar no reparo tecidual, melhorando a qualidade da cicatrização e reduzindo as possibilidades de intercorrência). Dê preferência a monodoses estéreis.
- Finalização: máscara protetora estéril.

A segunda e terceira sessão deverão ser realizadas com intervalo de 7 dias, após aplicação do Jato de Plasma.

2ª Sessão e 3ª Sessão (intervalo de 7 dias)

- ILIB (Recover) Luz vermelha (aplicação transcutânea) 30 min.
- Higienização – Espuma com Clorexidina. Aplicar sobre a face toda e remover com água. Secar bem a pele com toalha ou lenço de papel
- Peeling Plasma (New Skin) - Ponteira L - Ajustar a intensidade de acordo com a sensibilidade da pele, aplicar o peeling com a ponteira L em toda face de modo homogêneo. Em seguida reforçar nas áreas com cicatriz de acne.
- Led azul aplicar em toda face (Vênus) para hidratação e descontaminação.
Aplicar 2min em modo varredura em toda face
- Luz verde e vermelha para reparo tecidual (New Skin)
Aplicar 20 seg no modo de emissão simultânea de modo pontual sobre as lesões.
- Luz âmbar com infra (Vênus). Aplicar 20 seg do modo emissão simultânea de modo pontual sobre as áreas com lesões.
- Aplicação dermocosméticos (os ativos indicados para esta fase são específicos para auxiliar no reparo tecidual, melhorando a qualidade da cicatrização e reduzindo as possibilidades de intercorrência).
- Finalização: Aplicar sérum hidratante a base de ácido hialurônico e FPS.

CUIDADOS HOME CARE

Os cuidados Home Care são essenciais para o sucesso do tratamento.

É recomendado:

- O uso de higienizadores sem agentes agressivos;
- Água Termal;
- Ativos em sérum como ácido hialurônico com efeito hidratante e preenchedor; Vitamina C;
- Ativos preventivos da pigmentação inflamatória como o por exemplo o Tranexâmico;
- Filtro solar.

- Caso Clínico | Protocolo PLASMAREPAIR | Cicatriz de Acne

ANTES E DEPOIS



Resultado para 1 ciclo de tratamento

Tratamento para
Envelhecimento:
Linhas de expressão
e Flacidez

ETAPA

02



PROTOCOLO DE SUGESTÃO


- **ENVELHECIMENTO CUTÂNEO**

O envelhecimento é um processo biológico complexo e contínuo, e afeta as estruturas da pele causando rugas e flacidez.


Caracteriza-se por:

- Alterações celulares e moleculares; (aceleram o envelhecimento, comprometem o sistema);
- Diminuição progressiva da capacidade de manter a homeostasia celular (falta nutrientes e energia);
- Senescência ou morte celular (acelera o processo).

Pele Jovem

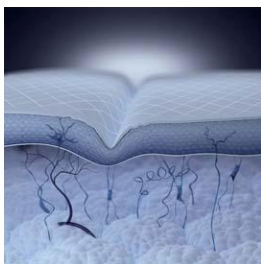

Pele Envelhecida

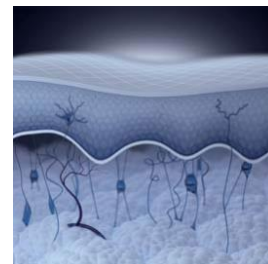

Stress Oxidativo
+
Degeneração celular

PLASMAREPAIR

Terapia de reparo tecidual no tratamento do envelhecimento cutâneo. A terapia de reparo tecidual se baseia no potencial de auto reparo da pele.

Quando promovemos uma lesão na pele, através do jato de plasma, instala-se um processo inflamatório e com ele o processo de reparo da lesão com a produção de novas substâncias de sustentação da pele, promovendo o efeito rejuvenescedor e tensor.

Para que o processo tenha sucesso é necessário que a pele esteja em condições de reparo para que não ocorram intercorrências indesejadas no processo cicatricial.

O preparo inclui:

- Limpeza de pele;
- Peeling superficial;
- Hidratação;

Adequação do uso Skin Care.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO

- **NEW SKIN** (*Peeling elétrico e Jato de plasma*).
- **VÊNUS** (*Fotobiomodulação Laser e LED*).
- **RECOVER** (*Fotobiomodulação Sistêmica Vascular*).



PROTOCOLO DE SUGESTÃO

- **ENVELHECIMENTO - LINHAS E FLACIDEZ**

Este protocolo deverá ser realizado com intervalo de 7 dias, após preparo de pele.

1ª Sessão

- ILIB (Recover) Luz vermelha (aplicação transcutânea) 30 min.
- Higienização – Espuma com Clorexidina. - Aplicar sobre a face toda e remover com água. Secar bem a pele com toalha ou lenço de papel.
- Peeling Plasma (New Skin) ponteira L.
 - Ajustar a intensidade de acordo com a sensibilidade da pele, aplicar o peeling com a ponteira L em toda face de modo homogêneo.
- Led azul aplicar em toda face (Vênus) para hidratação e descontaminação. Aplicar 2 min. em modo varredura em toda face.
- Jato de plasma pontilhado nas linhas de expressão e áreas de flacidez (New Skin).
 - Ajustar a intensidade de acordo o tipo e sensibilidade da pele.
 - Aplicar de modo pontilhado fazendo todo contorno da linha de expressão ou ruga.
- Luz verde e vermelha (reparo tecidual). New Skin
 - Aplicar 20 seg no modo de emissão simultânea de modo pontual sobre as lesões.
- Luz âmbar com infra (Vênus) - Aplicar 20 seg do modo emissão simultânea de modo pontual sobre as áreas com lesões.
- Aplicação dermocosméticos (os ativos indicados para esta fase são específicos para auxiliar na produção de colágeno e no reparo tecidual, melhorando a qualidade da cicatrização e reduzindo as possibilidades de intercorrência). Dê preferência a monodoses estéreis.
- Finalização: máscara protetora estéril.

PROTOCOLO DE SUGESTÃO

- ENVELHECIMENTO CUTÂNEO

A segunda sessão deverá ser realizada com intervalo de 7 dias, após aplicação do Jato de Plasma

2ª Sessão e 3ª Sessão (intervalo de 7 dias)

- ILIB (Recover) - Luz vermelha (aplicação transcutânea) 30 min.
- Higienização – Espuma com Clorexidina.
 - Aplicar sobre a face toda e remover com água. Secar bem a pele com toalha ou lenço de papel
- Peeling Plasma (New Skin) - Ponteira L
Ajustar a intensidade de acordo com a sensibilidade da pele, aplicar o peeling com a ponteira L em toda face de modo homogêneo.
- Led azul aplicar em toda face (Vênus) (hidratação, descontaminação)
Aplicar 2 min em modo varredura em toda face.
- Luz verde e vermelha para reparo tecidual (New Skin)
 - Aplicar 20 seg no modo de emissão simultânea de modo pontual sobre as lesões.
- Luz âmbar com infravermelho (Vênus).
 - Aplicar 20 seg do modo emissão simultânea de modo pontual sobre as áreas com lesões.
- Aplicação dermocosméticos (os ativos indicados para esta fase são específicos para auxiliar no reparo tecidual, aumentar a produção de colágeno e melhorar a qualidade da cicatrização reduzindo as possibilidades de intercorrência).
- Finalização: Sêrum Revitalizante com fatores de crescimento e ácido hialurônico – FPS

CUIDADOS HOME CARE

Os cuidados Home Care são essenciais para o sucesso do tratamento.

É recomendado:

- O uso de higienizadores sem agentes agressivos;
- Água Termal;
- Para o dia: Produtos com Ativos em sérum como por exemplo ácido hialurônico com efeito hidratante e preenchedor;
- Vitamina C - Filtro Solar
- Para a noite: Produtos com Ativos preventivos da pigmentação inflamatória como o Tranexâmico e revitalizantes.

- Caso Clínico | Protocolo PLASMAREPAIR | Envelhecimento Cutâneo

ANTES E DEPOIS





PLASMA **REVERSE**

TÉCNICAS PARA PELES QUE PRECISAM DE CUIDADOS.

Tratamento com
intuito de inibir e
reverter peles
com manchas
e olheiras.



SANDRA COSTA



PLASMA REVERSE

Nossa pele é uma das características mais distintas e significativas do nosso ser, e quando manchas aparecem, podem afetar nossa autoestima e confiança. Ao enfrentarmos o desafio do tratamento de manchas na pele, é importante lembrar que a jornada para uma pele saudável e radiante muitas vezes requer esforço e persistência. As manchas podem surgir por diversas razões, como exposição ao sol, envelhecimento, acne ou outros fatores. Entender que cada caso é único e exige uma abordagem personalizada é o primeiro passo para alcançar resultados satisfatórios.

A dificuldade do tratamento reside, muitas vezes, nas diferentes camadas da pele afetadas e na variedade de pigmentações que podem estar presentes. Além disso, alguns tratamentos podem demandar tempo para mostrar resultados visíveis. É importante ter paciência e evitar soluções rápidas e superficiais que podem não resolver o problema de forma eficaz.


Para alcançar uma pele verdadeiramente renovada e livre de manchas, é necessário um comprometimento a longo prazo e manter uma rotina de cuidados diários com a pele e protegê-la dos danos causados pelo sol.

Através da Técnica **PLASMAREVERSE**, temos uma combinação de tecnologias e recursos onde é possível, com o uso do Peeling de Plasma associado a Fotobiomodulação, melhorar a qualidade da circulação, oxigenação e nutrição da pele, reativando funções celulares comprometidas e promover a melhora de disfunções como as manchas e olheiras.

Tratamento de Manchas

ETAPA

01

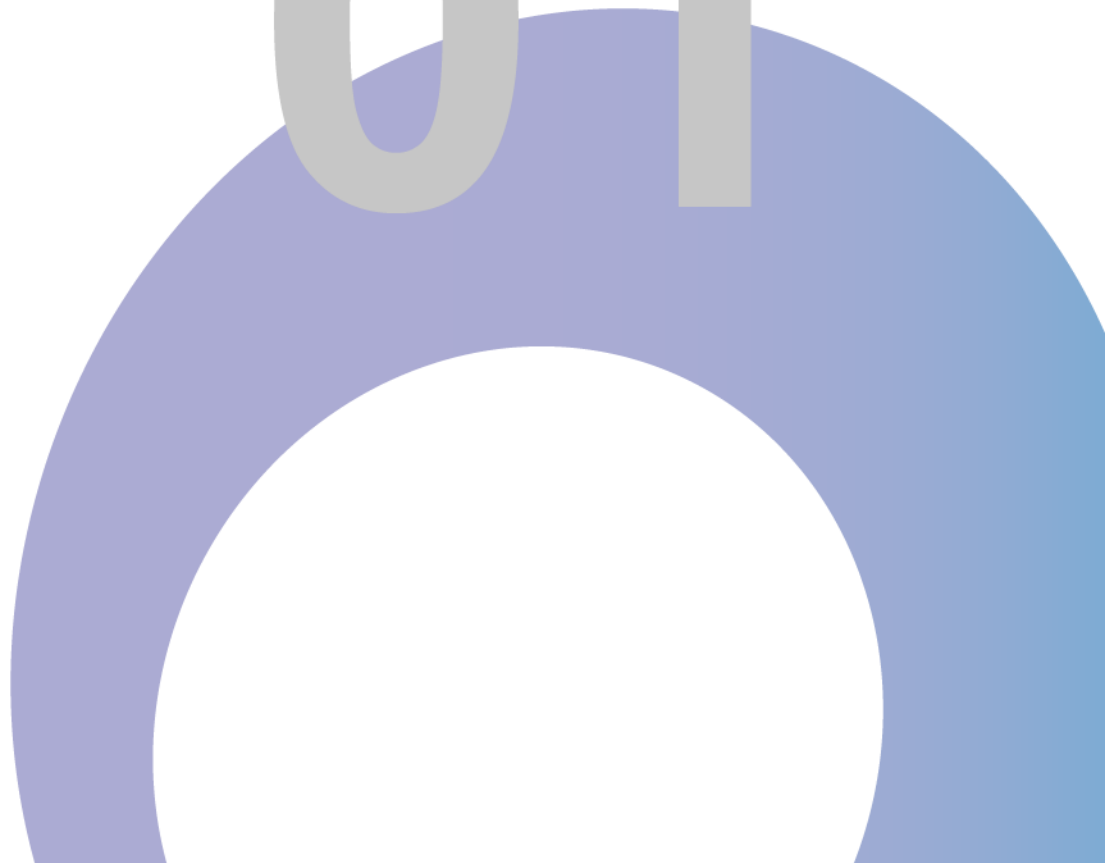

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO

- **NEW SKIN** (*Peeling elétrico e Jato de plasma*).
- **VÊNUS** (*Fotobiomodulação Laser e LED*).
- **RECOVER** (*Fotobiomodulação Sistêmica Vascular*).



PROTOCOLO DE SUGESTÃO

- **MANCHAS**

- ILIB (Recover) - Luz vermelha (aplicação transcutânea) – 30 min.
- Higienização – Espuma com Clorexidina.
 - Aplicar sobre a face toda e remover com água. Secar bem a pele com toalha ou lenço de papel.
- Peeling Plasma (New Skin) - Ponteira L
 - Ajustar a intensidade de acordo com a sensibilidade da pele, aplicar o peeling com a ponteira L em toda face de modo homogêneo.
- Com a ponteira C aplicar sobre áreas de contorno, como áreas dos olhos e orbicular da boca.
- Led azul aplicar em toda face (Vênus) (hidratação, descontaminação)
 - Aplicar 2 min em modo varredura em toda face.
- Laser vermelho (Vênus)
 - Aplicar 30 seg por ponto, nos principais locais onde tem manchas.
- Luz âmbar (Vênus) - Aplicar 20 seg por ponto em toda face, repetir nos locais manchas.
- Aplicação dermocosméticos (os ativos indicados para esta fase são de ação clareadora específicos para auxiliar no controle da pigmentação da pele).
- Finalização: máscara clareadora.
- Aplicar FPS adequado.

Este protocolo pode ser feito em 4 sessões com intervalos semanais e depois mais 4 sessões com intervalo de 15 dias.

Não dispensar produtos no *home care* para garantir resultados mais duradouros.

Obs. Este protocolo não é recomendado para manchas de Melasma devido ao calor referente ao peeling de Plasma.

- Caso Clínico | Protocolo PLASMAREVERSE | Manchas

ANTES E DEPOIS



Tratamento de Olheiras

ETAPA

02



EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO

- **NEW SKIN** (*Peeling elétrico e Jato de plasma*).
- **VÊNUS** (*Fotobiomodulação Laser e LED*).
- **RECOVER** (*Fotobiomodulação Sistêmica Vascular*).



PROTOCOLO DE SUGESTÃO

- **OLHEIRAS**

Este protocolo deverá ser realizado com intervalo de 7 dias, após preparo de pele.

- ILIB (Recover) - Luz vermelha (aplicação transcutânea) - 30min.
- Higienização – Espuma com Clorexidina
- Aplicar sobre a face toda e remover com água. Secar bem a pele com toalha ou lenço de papel.
- Peeling Plasma (New Skin) Ponteira C:
- Ajustar a intensidade de acordo com a sensibilidade da pele, aplicar o peeling na região do orbicular dos olhos, inclusive se possível pálpebra superior.
- Led azul (Vênus)
- Aplicar de modo pontual 10 seg pontual na região do orbicular dos olhos (hidratação, descontaminação).
- Laser vermelho (Vênus)
- Aplicar 20 seg por ponto, na região do orbicular dos olhos.

- Luz âmbar (Vênus)
 - Aplicar 10 segundos pontual na região orbicular dos olhos.
- Aplicação dermocosméticos (os ativos indicados para esta fase são de ação clareadora específicos para área dos olhos.
- Finalização (máscara clareadora).

Aplicar FPS adequado.

Este protocolo pode ser feito 4 sessões com intervalos semanais e depois mais 4 sessões com intervalo de 15 dias.

Obs. Não dispensar produtos no *home care* para garantir resultados mais duradouros.

- Caso Clínico | Protocolo PLASMAREVERSE | Olheiras

ANTES E DEPOIS

