

— BEAUTYLIGHT —

PROTOCOLS



• Protocolos Inovadores, Resultados Surpreendentes •

LIGHTHAIR))
CONTROL))

LIGHTHAIR))
ANTIAGE))

AUTORA DOS PROTOCOLOS:

- LIGHTHAIR CONTROL E LIGHTHAIR ANTIAGE



ROSE DA MATTA

- Graduada em Biologia pelo Centro Universitário Barão de Mauá (há 30 anos);
- Pós-Graduada em Cosmetologia e Estética Avançada pela Universidade Anhembi Morumbi;
- Professora convidada no curso de especialização em Visagismo e Tricologia da Universidade Anhembi Morumbi;
- Professora da Graduação em Estética e Cosmetologia em SP;
- Professora do Mestrado em Hof no European Face Institute;
- Colaboradora de pesquisa e ensino em Fototerapia CEPOF, IFCS – São Carlos-SP;
- Ministrante de Cursos e Palestras na área de Saúde Estética;
- Consultora de tricologia na MMO.

SOBRE O PROJETO

— BEAUTYLIGHT —

PROTOCOLS

O **BEAUTYLIGHT PROTOCOLS** é um projeto que têm a combinação das melhores tecnologias MMO com resultados que irão te surpreender.

Consultores se uniram para elaborar protocolos com técnicas exclusivas e revolucionárias da área da estética para tratamentos faciais, corporais e capilares denominados das seguintes formas:

- **FACIAL:** PLASMAREPAIR E PLASMAREVERSE.
- **CORPORAL:** VACUMLASER INTENSIVE E VACUMLASER TRANSITION.
- **CAPILAR:** LIGHTHAIR CONTROL E LIGHTHAIR ANTIAGE.

PROTOCOLO LIGHTHAIR CONTROL



A alopecia é definida como ausência, rarefação ou queda dos cabelos e pelos, de forma transitória ou permanente, podendo atingir homens e mulheres em diversas faixas etárias. Os fatores predisponentes mais importantes são genéticos e hormonais, porém diversas podem ser as causas da rarefação capilar.

A fotobiomodulação para o tratamento de diferentes formas de perda de cabelo vem sendo estudada e novos protocolos e dermocosméticos vem se desenvolvendo com muita eficácia.

Através do projeto LIGHT HAIR CONTROL, temos uma combinação de tecnologias como os LEDs e LASERs, onde é possível estimular e reativar o funcionamento das células dos folículos pilosos, promovendo a recuperação dos cabelos que foram afetados com os vários tipos de alopecias como os eflúvios, a androgenética, as metabólicas entre outras.

LIGHTHAIR CONTROL

PROTOCOLOS INOVADORES PARA ALOPECIA.

Técnicas que induzem um efeito positivo no crescimento do cabelo, por absorção de cromóforos presentes no folículo piloso, que prolongam a fase anágena.



ROSE DA MATTA

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO


- **EVINCE** (*Diagnóstico em tempo real*).
- **VACUM LASER** (*Ação sinérgica da vacuoterapia com Fotobiomodulação vermelha e infravermelha*).
- **LUMINUS** (*Fotobiomodulação LED Vermelho e Azul*).
- **RECOVER** (*Fotobiomodulação Sistêmica Vascular*).



Tratamento para Alopecia

ETAPA

01

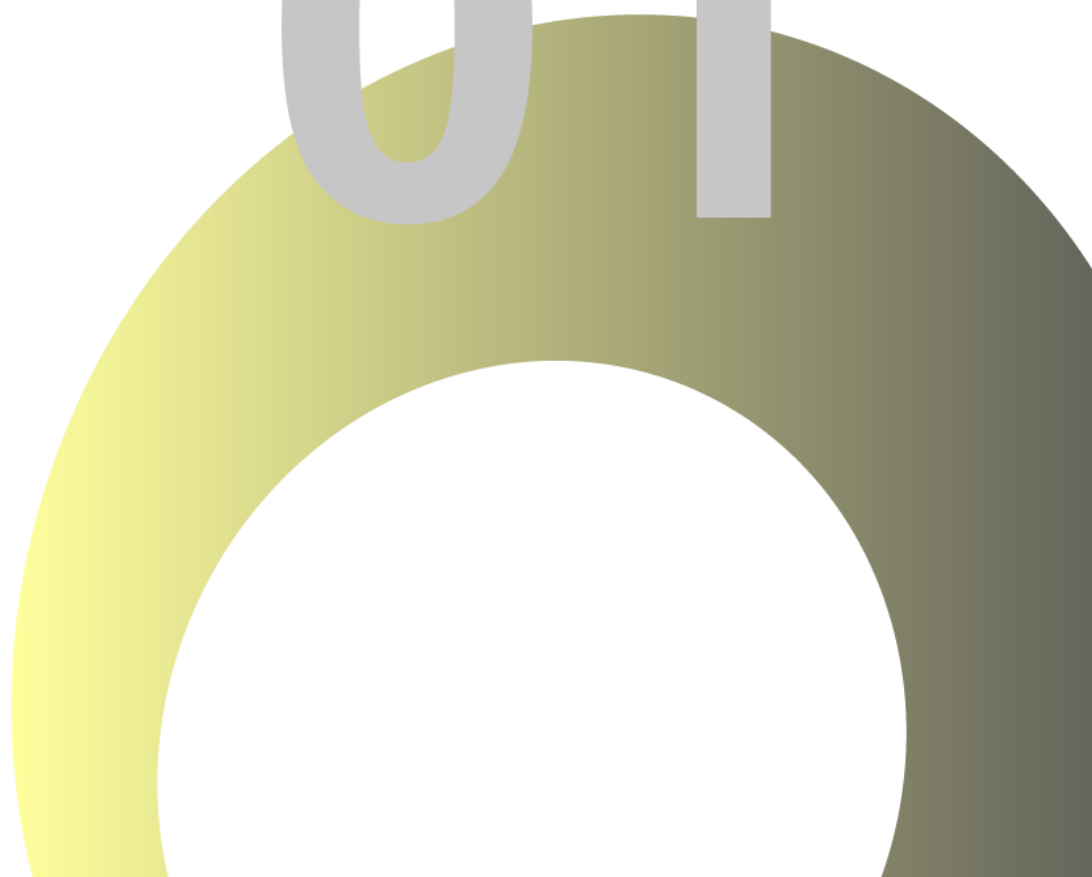

PROTOCOLO DE SUGESTÃO PARA ALOPECIA


Tratamento Alopecia Masculina

- Fotodiagnóstico(Evince): avaliar couro cabeludo e haste capilar.
- ILIB (Recover) - Luz vermelha (aplicação transcutânea) 30min.
- Higienizar: utilizar produto adequado, massagear e remover com água.
- Vacum Laser: ventosa de vidro, modo pulsado, pressão de 100 a 250 mbar localmente 30 segundos a 1 minutos/área (estímulo da vascularização).
- Aplicação dermocosmético (tônico ou sérum com os ativos para queda capilar de acordo com a escolha do profissional.
- LED Azul (Luminus): acoplar o acessório pente e aplicar modo em varredura lenta em toda a região a ser tratada por 5 minutos.
- LED Vermelho (Luminus): acoplar o acessório pente e aplicar modo em varredura lenta em toda a região a ser tratada por 5 minutos.

Intervalo entre sessões: intervalo semanal.

Caso Clínico | Protocolo LIGHTHAIR CONTROL

ANTES E DEPOIS

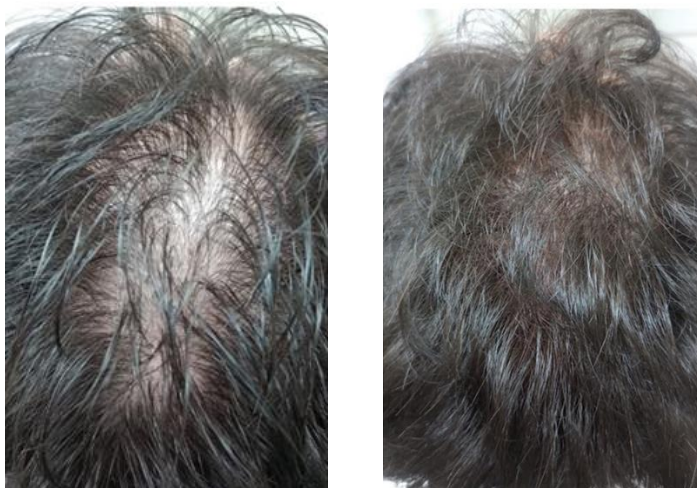

Tratamento Alopécia Feminina

- Fotodiagnóstico(Evince): avaliar couro cabeludo e haste capilar.
- ILIB (Recover) - Luz vermelha (aplicação transcutânea) 30min.
- Higienizar: utilizar produto adequado, massagear e remover com água.
- Aplicar dermocosméticos em toda extensão dos fios (máscaras fortalecedoras argilosas com blends de óleos essenciais com efeito detox).
- LED Azul (Luminus): acoplar o acessório pente e aplicar modo em varredura lenta em toda a região a ser tratada por 5 minutos. Remover o produto com água.
- Aplicar dermocosméticos no couro cabeludo (tônico que contenha ativos como fator de crescimento vascular (VEGF), compostos antioxidantes, ativadores da microcirculação como a cafeína, e que estimulem o colágeno para melhor adesão do fio no folículo), entre outros, não remover.
- Vacuum Laser: ventosa de vidro, modo pulsado, pressão de 100 a 250mbar, laser V e IV, localmente 30 segundos a 1 minutos/área (estímulo da vascularização).
- **Finalização:** secar os cabelos e aplicar LED Azul (Luminus) em varredura em toda extensão desde o couro cabeludo e em toda haste capilar para realinhar as cutículas.

Intervalo entre sessões: intervalo semanal.

ANTES E DEPOIS



LIGHTHAIR ANTIAGE

PROTOCOLOS PARA ANTIENVELHECIMENTO CAPILAR.

Técnicas que hidratam
os fios, alinham as
cutículas e contribuem
efetivamente no
gerenciamento do
cabelo saudável.



ROSE DA MATTA

LIGHTHAIR ANTIAGE

O envelhecimento capilar é um processo natural que afeta os cabelos com o passar do tempo. Conforme envelhecemos, a produção de melanina diminui, levando ao aparecimento de cabelos brancos ou grisalhos.


Além disso, os cabelos podem ficar mais finos, secos e fracos devido à redução da produção de óleos naturais somado ao excesso de químicas, alterações no metabolismo e declínio da saúde. Cuidados adequados, como o uso de produtos específicos e uma dieta balanceada, podem ajudar a manter a saúde dos cabelos ao longo dos anos.

O programa de tratamento LIGHTHAIR ANTIAGE, visa atenuar os desgastes da fibra capilar e as alterações do couro cabeludo e recuperar os cabelos com um programa completo inovador com o uso da fotobiomodulação para o gerenciamento do cabelo saudável.

Tratamento para
**Antienvelhecimento
capilar**

ETAPA

01

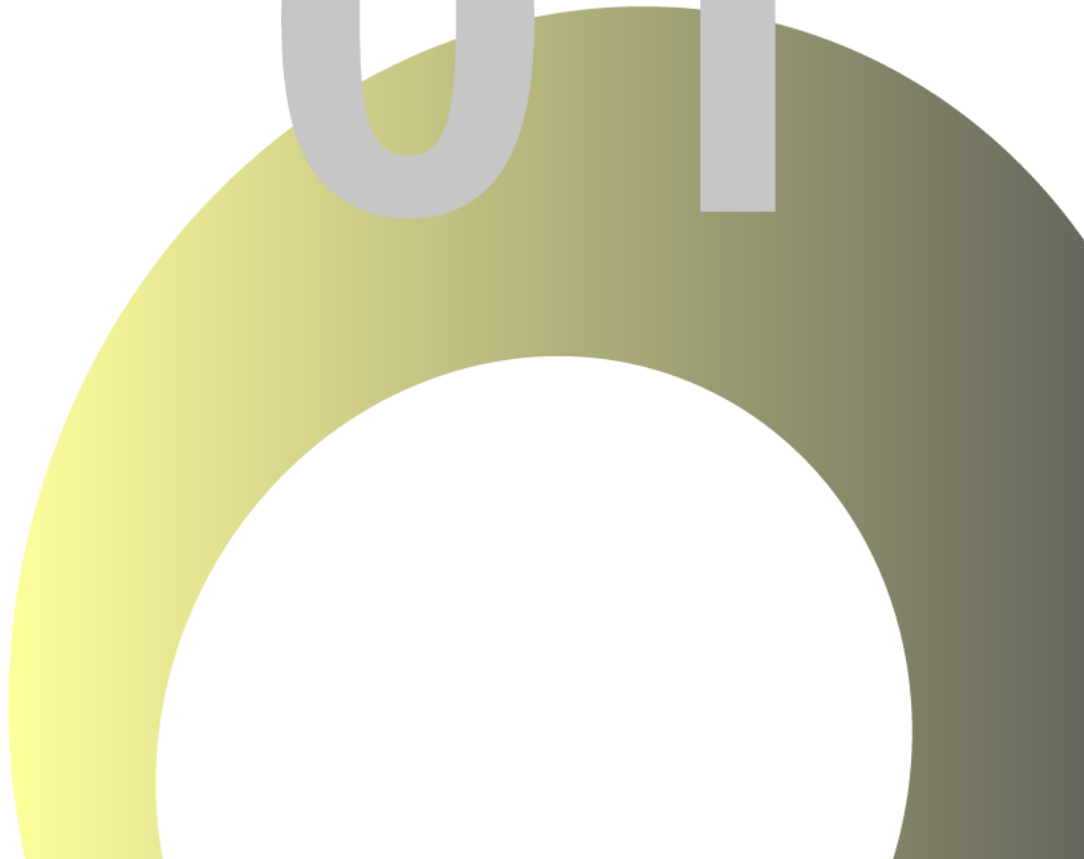

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO

- **EVINCE** (*Diagnóstico em tempo real*).
- **VACUM LASER** (*Ação sinérgica da vacuoterapia com Fotobiomodulação vermelha e infravermelha*).
- **LUMINUS** (*Fotobiomodulação LED Vermelho e Azul*).
- **RECOVER** (*Fotobiomodulação Sistêmica Vascular*).



PROTOCOLO DE SUGESTÃO PARA ANTIENVELHECIMENTO CAPILAR

Tratamento Antienvelhecimento dos fios

- Fotodiagnóstico (Evince): avaliar couro cabeludo e haste capilar.
- ILIB (Recover) - Luz vermelha (aplicação transcutânea) 30min.
- Higienizar: utilizar produto adequado, massagear e remover com água
- Vacum Laser: ventosa de vidro, modo pulsado, pressão de 100 a 250 mbar localmente 30 segundos a 1 minutos/área (estímulo da vascularização). Em caso de rarefação e enfraquecimento capilar poderá ser utilizado associado a dermocosmético fotoativado.
- Aplicação dermocosméticos (os ativos podem ser fotoativados ou foto permeados de acordo com a escolha do profissional.
- LED Azul: acoplar o acessório pente e aplicar modo em varredura lenta em toda a região a ser tratada por 5 minutos.
- LED Vermelho com o acessório pente e aplicar modo em varredura lenta em toda a região a ser tratada por 5 minutos. Remover o produto com água.
- Secar os cabelos e finalizar o procedimento com LED Azul em varredura para selar as cutículas.

Intervalo entre sessões: intervalo semanal.

- Caso Clínico | Protocolo LIGHTHAIR ANTIAGE
ANTES E DEPOIS

