

Protocolos de Fotobiomodulação aplicado ao Piercing | Dra. Karen Laurenti | RECOVER E LASER DUO

Procedimento	Protocolo	Reavaliação	Indicação de aplicação
Pós-Perfuração Imediata	Após realizar a perfuração de forma asséptica, limpar e hidratar o local, aplicar a Fotobiomodulação. Laser vermelho: 10 a 30 segundos (1 a 3 Joules) - aplicar ao redor e em cima da perfuração (no caso de perfuração auricular, realizar frente e verso da orelha). Laser infravermelho: 30 a 40 segundos (3 a 4 Joules) - ao redor da perfuração em formato de cruz ou pontos cardeais: Norte/Sul/Leste/Oeste (associar sempre que cliente apresentar queixa de dor e/ou edema imediato).	12 a 24h após a perfuração.	1x/semana nos primeiros 30 dias ou até que haja cicatrização total.
Manutenção <i>(avaliação da perfuração, redução de haste, troca de joias, limpeza da joia e perfuração).</i>	Laser infravermelho: 30 a 40 segundos (3 a 4 Joules) - ao redor da perfuração.	12 a 24h após a manutenção.	Caso haja cicatrização completa, porém após a manipulação da perfuração, o local apresente vermelhidão e edema discreto.
Edema	Laser infravermelho: 30 a 40 segundos (3 a 4 Joules) - em cima da perfuração e ao redor da perfuração em formato de cruz ou pontos cardeais: Norte/Sul/Leste/Oeste.	12 a 24h.	Investigar a causa do edema. Aplicar cada 48h se edema persistente.
Edema e Ferimento da Perfuração	Laser vermelho: 30 a 60 segundos (3J a 6 Joules) - aplicar ao redor e em cima da perfuração (no caso de perfuração auricular, realizar frente e verso da orelha). Laser infravermelho: 30 a 40 segundos (3 a 4 Joules) - ao redor da perfuração em formato de cruz ou pontos cardeais: Norte/Sul/Leste/Oeste (associar sempre que cliente apresentar queixa de dor e/ou edema imediato).	12 a 24h pós-procedimento.	A cada 48h até diminuição dos sintomas.
Trauma com Edema, sem nenhuma lesão aparente	Laser infravermelho: 30 a 40 segundos (3 a 4 Joules) - em cima da perfuração e ao redor da perfuração em formato de cruz ou pontos cardeais: Norte/Sul/Leste/Oeste.	12 a 24h pós-procedimento	A cada 48h, se edema persistente.
Granuloma	Laser infravermelho: 40 a 60 segundos (4 a 6 Joules) - dependendo do tamanho da área de inflamação.	12 a 24h após o procedimento	1 a 2x/semana.